

JUNIOR[®]



Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les veaux.

testé
scientifiquement

Qu'est-ce que JUNIOR?

Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les veaux. Pratique et plus doux.

À qui est destiné JUNIOR?

Aux veaux allaités.

En quoi est-il ergonomique?

JUNIOR est recourbé, comme les voies allant de la gueule à l'œsophage.

Le calice de JUNIOR est rond.

En quoi est-il plus pratique?

JUNIOR tient mieux dans la main. On ne doit pas changer de prise.

Comment l'utiliser?

Placer la pilule dans le calice. Saisir la partie de la mâchoire dépourvue de dents avec une main par-dessus le nez. Chatouiller le palais jusqu'à

ce que le veau ouvre la gueule.


Avec l'autre main, introduire JUNIOR avec précaution. L'avancer par-dessus la base de la langue. Libérer la pilule.

Comment le nettoyer?

Rincer à l'eau chaude.



Chatouiller le palais jusqu'à ce que le veau ouvre la gueule.

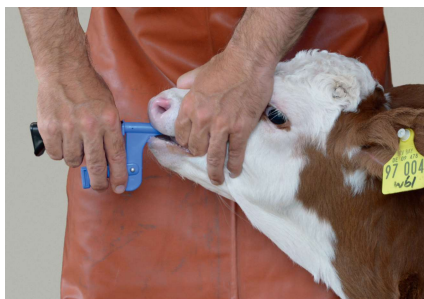

Introduire prudemment l'applicateur.



JUNIOR. Ergonomique.

JUNIOR. Testé scientifiquement.

JUNIOR[®]. Plus pratique et plus doux.