

# JUNIOR<sup>®</sup>



## Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les veaux.

testé  
scientifiquement

### Qu'est-ce que JUNIOR?

Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les veaux. Pratique et plus doux.

### À qui est destiné JUNIOR?

Aux veaux allaités.

### En quoi est-il ergonomique?

JUNIOR est recourbé, comme les voies allant de la gueule à l'œsophage.

Le calice de JUNIOR est rond.

### En quoi est-il plus pratique?

JUNIOR tient mieux dans la main. On ne doit pas changer de prise.

### Comment l'utiliser?

Placer la pilule dans le calice. Saisir la partie de la mâchoire dépourvue de dents avec une main par-dessus le nez. Chatouiller le palais jusqu'à

ce que le veau ouvre la gueule.


Avec l'autre main, introduire JUNIOR avec précaution. L'avancer par-dessus la base de la langue. Libérer la pilule.

### Comment le nettoyer?

Rincer à l'eau chaude.



Chatouiller le palais jusqu'à ce que le veau ouvre la gueule.

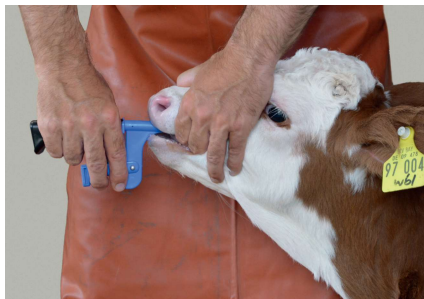

Introduire prudemment l'applicateur.



JUNIOR. Ergonomique.

JUNIOR. Testé scientifiquement.

## JUNIOR<sup>®</sup>. Plus pratique et plus doux.

# SENIOR<sup>®</sup>



## Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les vaches.

testé  
scientifiquement

### Qu'est-ce que SENIOR?

Le premier applicateur de pilules ergonomique pour les vaches. Pratique et plus doux.

### À qui est destiné SENIOR?

Aux vaches laitières.

### En quoi est-il ergonomique?

SENIOR est recourbé, comme les voies allant de la gueule à l'œsophage. Sa terminaison est arrondie.

### En quoi est-il plus pratique?

SENIOR tient mieux dans la main.

### En quelle matière SENIOR est-il fait?

Le tube est en acier inoxydable, la tige d'éjection en matière synthétique.

### Comment l'utiliser?

Placer la pilule. Saisir la partie de la mâchoire dépourvue de dents avec une main par-dessus le nez.


Chatouiller le palais jusqu'à ce que la vache ouvre la gueule. Avec l'autre main, introduire SENIOR avec précaution. L'avancer par-dessus la base de la langue jusqu'à ce que la vis rouge se situe au niveau du mufle. Libérer la pilule.

### Comment le nettoyer?

Rincer à l'eau chaude.



Chatouiller le palais jusqu'à ce que la vache ouvre la gueule.

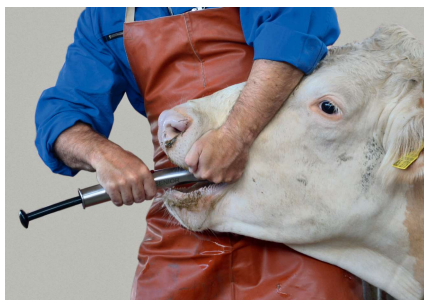

Introduire prudemment l'applicateur.



SENIOR. Ergonomique.

SENIOR. Testé scientifiquement.

SENIOR<sup>®</sup>. Plus pratique et plus doux.